



Allevio migränkateter

**När ingenting
annat hjälper**



Allevio migränkateter hjälper patienter med migrän, Hortons huvudvärk samt trigeminusneuralgi där er nuvarande behandling inte räcker till!

Allevio - migränkateter är utvecklad i USA där behandlingen är etablerad. Allevio - migränkateter används redan på sjukhus till patienter där ordinarie behandling inte har hjälpt fullt ut. På detta sätt har flera patienter med migrän och migränliknande symptom erhållit en bra hjälp.

Produkten

Allevio - migränkateter består av två stycken plastkatetrar införda i varandra. Vid användning böjs den inre katetern automatiskt så att den kommer in i näsans bakre del, Sphenopalatina (SPG). Det man gör är att bedöva SPG nervknuten. Genom katetern injiceras 4 % lokalbedövningsmedel typ Lidokain som finns att specialbeställa på apoteket. Allevio - migränkateter är CE godkänd som medicinteknisk produkt och enkel att använda.

Hur gör man?


Titta gärna på en kort film som finns på vår hemsida. Filmen är 2 minuter lång och där visar man hur enkelt och praktiskt behandlingen går till (filmen är på engelska).

www.curemednordic.se



Så här gör man enkelt - praktisk användning

1. Patienten ligger ner på bröstsäng
2. Allevio - migränkateter förs in i ena näsborren tills det tar stopp
3. Dra tillbaka katetern 5 mm (en halv markering märkt på katetern)
4. Tryck in den inre katetern som då kommer att hamna automatiskt i hålrummet
5. Injicera 2 ml 4 % lokalbedövningsmedel genom katetern
6. Dra ut katetern
7. Gör samma procedur i andra näsborren.
8. Patienten skall ligga kvar i ryggsläge i ca 10 minuter

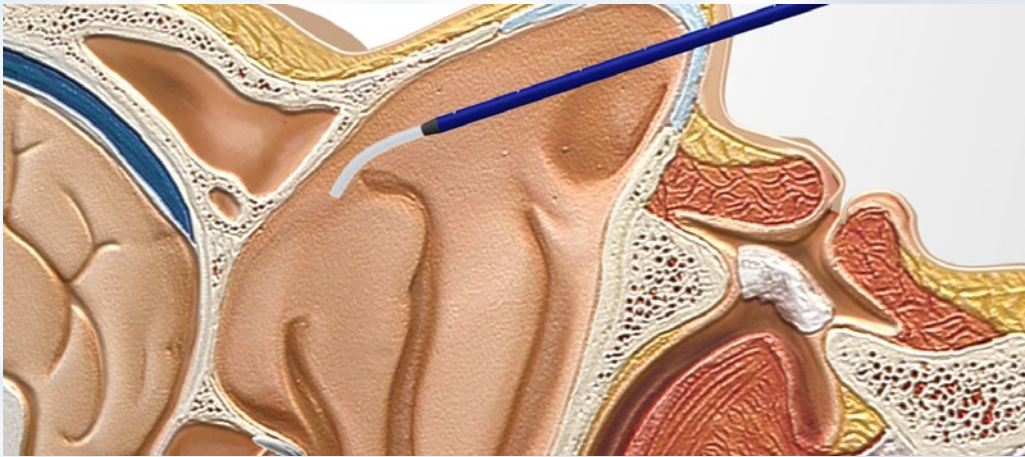

Hur ofta bör behandlingen genomföras?

Enligt erfarenheter från sjukhus i USA så har man börjat med att ge behandlingen 2 gånger i veckan under en 3 veckors period. Därefter har man följt upp och antingen så har man ökat på behandlingen eller minskat frekvensen på. Behandlingen individualiseras efter effekten hos patienten. Det finns inga biverkningar.

En del patienter får omedelbar effekt av behandlingen och andra tar lite längre tid. Principen för behandlingen har funnits i många år men det har tidigare inte funnits någon bra metod för att få den verksamma substansen på plats på rätt ställe.

Med Allevio - migränkateter är det nu möjligt att genomföra behandlingen på ett enkelt sätt i tex primärvården och privatläkarmottagningar.

CureMed Nordic AB är ett svenskt medicintekniskt företag med huvudkontor och lager i Göteborg. I vårt sortiment finner ni världsledande produkter inom sjukvård och medicinteknik varav många kan produceras kundanpassat. Vårt mål är att alltid erbjuda sjukvården innovativa produkter från ledande producenter på ett kostnadseffektivt sätt.

CureMed
NORDIC

Sammanfattning

- Nu finns det en möjlighet att hjälpa migränpatienter med svåra besvär där ordinarie behandling inte hjälper fullt ut
- Mycket enkel att använda
- Inga biverkningar
- CE-godkänd
- Samma patient kan använda samma kateter ett par gånger
- Används för Migrän, Hortons huvudvärk samt Trigeminusneuralgi

Allevio – migränkateter beställs från CureMed Nordic AB och 4 % lokalbedövningsmedel beställs från apoteket.

**Intresserad av att använda Allevio – migränkateter på någon patient? Eller en presentation?
Hör vänligen av dig till CureMed Nordic AB
på tel 031-47 58 00 eller info@curemednordic.se**

