



# KINLee

FT3010 Elektronisk infraröd Panntermometer

Produktbeskrivning

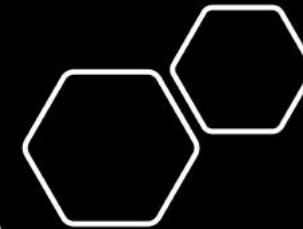

## TEKNISK DATA

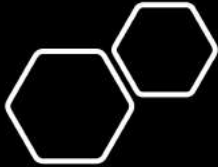

### Driftförhållande

- Temperatur: 16 °C ~ 40
- Relativ luftfuktighet: 15% ~ 95% RF
- Atmosfäriskt tryck: 860-1060hPa
- Strömförsörjning: DC 3V (2 x AA LR6)

### Transportvillkor och lagring

- Omgivningstemperatur: -20 °C ~ 50 °C
- Relativ luftfuktighet (RH): 15% -95%
- Atmosfäriskt tryck: 860-1060hPa

### Dimensioner

- Dimension 90mm \* 43mm \* 148mm (längd \* bredd \* höjd)
- Vikt (nettovikt) 100 g (exklusive batterierna)

- LCD skärmupplösning: 0,1 °C (0,1 °F)
- Kroppstemperatur: 22,0 ~ 43,0 °C (71,6 ~ 109,4 °F)
- Yttemperatur: 0 ~ 100 °C (32.0 ~ 212.0 °F)

### Måttnoggrannhet:

- 1) 22,0 ~ 42,0 °C: ± 0,3 °C
- 2) < 22,0 °C: ± 0,5 °C
- 3) > 42,0 °C: ± 0,5 °C
  
- Upprepbarhet ≤ ± 0,2 °C
- Effekt ≤ 50 mW
- Mätningstid ≤ 1 sekund
- Distans: 30mm ~ 50mm
- Blackbody rekommenderas för verifiering: Blackbody-behandlade i 6.1.3.3 av E1965-98 (2009)
- Auto-off-tid 10 sekunder
- Mätdata/minnen: 32 mätningar
- Kroppstemperatur: Det visade värdet visar kroppstemperatur anpassad till armhålan

**KINLee FT3010-** infraröd panntermometer som är en medicinteknisk produkt avsedd för mätning av pannans temperatur.

Pannan har blodkärl som är mycket mindre benägna till sammandragning vilket är en naturlig funktion vid justering av kroppstemperatur.

Termometern påvisar det infraröda utsläppet av huden i pannan vid den uppmätta punkten och beräknar sedan axilär-ekvivalent värde med hjälp av en unik algoritm baserad på faktisk kroppstemperatur.

Panntermometern kan också användas för att mäta temperaturen på tex en babyflaska, badvatten eller rumstemperatur (genom att använda ytläget)

För att hjälpa till med mätningar i mörker har enheten även bakgrundsbelysning.

**FT3010** använder en mycket exakt teknik med avancerade funktioner.

### • Nyckelfunktioner:


- Automatisk på och avstängning
- Stor och tydlig display
- Bakgrundsbelysning
- Inbyggd infraröd laserpekare för exakt mätning utan beröring
- Rengörs med 70 % sprit
- Minne för 32 mätningar
- Valbar mellan Celsius/Fahrenheit
- Snabbmätning med hög precision, bra för barn och vuxna.



## Använda enheten

### 1. Sätt i batterier


- Vänd upp och ner på enheten och skjut upp batteriluckan
- Sätt i två stycken AA batterier
- När du bytt batteri eller flyttat termometern till en ny miljö, vänta 30 min till användning så att termometern hinner acklimatisera sig

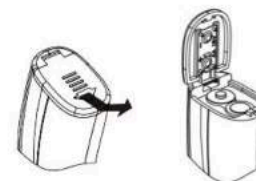

### 2. Mätning av kroppstemperatur

- Tryck på SET för att välja kroppstemperatur eller yttemperatur
- Håll termometerns lins 3-5 cm från pannan
- Lägg ett finger på knappen
- Tryck på knappen så kommer termometern att starta automatiskt och visa mätresultatet i displayen.
- Upprepa mätningen en eller flera gånger för säkert resultat

Vid mätning föreslås att du riktar linsen på olika ställen på pannan för att så nå den högsta och lägsta temperaturen. Det kan påverka mätnoggrannheten när pannan täcks av hår, svett, mössa eller halsduk.

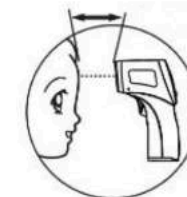

### Inställningar

Tryck på "SET" -knappen och håll den intryckt i 3 sekunder i inställningsläget.

Välj måtenhet --- Meny F1 Gå in i inställningsläge, LCD-skärmen visar "F1", tryck på "+" -knappen för att välja "°F" -enhet, tryck på "-" -knappen för att välja "°C" -enhet.

Inställning av varningsvärde --- Meny F2 【Standard 37,8 °C (100,4 °F)】 Gå in i inställningsläge, tryck kort på "SET" -knappen två gånger, LCD-skärmen visar "F2" och tryck sedan på "+" -knappen för att öka inställningsvärde 0,1 °C (0,1 °F), tryck på "-" -knappen för att minska inställningsvärdet 0,1 °C (0,1 °F).

Off inställning av värde --- Meny F3 【Standard 0,0 °C (0,0 °F)】 Gå in i inställningsläge, tryck "SET" -knappen trippel, LCD-displayen "F3", tryck sedan på "+" för att öka inställningen värde 0,1 °C (0,1 °F), tryck på "-" för att minska inställningsvärdet 0,1 °C (0,1 °F).

Inställning av ljudmeddelande Gå in i inställningsläge, tryck "SET" -knappen fyra gånger, LCD-skärmen "F4", tryck sedan på "+" för att aktivera ljudmeddelandefunktionen, tryck "-" för att slå på av ljudanmälningsfunktionen.

Inställning av bakgrundsbelysning --- Meny F5 Gå in i inställningsläge, tryck "SET" -knappen fem gånger, LCD-skärmen "F5", tryck sedan på "+" för att aktivera bakgrundsbelysningsfunktionen, tryck "-" -knappen för att vrida bakgrundsbelysningsfunktionen.

Avsluta inställningsläge Tryck på "SET" -knappen tills avstängning.