

CureMed Nordic AB är ett svenskt medicintekniskt företag med huvudkontor och lager i Göteborg. I vårt sortiment finner ni världsledande produkter inom sjukvård och medicinteknik varav många kan produceras kundanpassat. Vårt mål är att alltid erbjuda sjukvården innovativa produkter från ledande producenter på ett kostnadseffektivt sätt.

CureMed
NORDIC

Delta-T

När du behöver transportera temperaturkänsliga produkter där korrekt förvaringstemperatur krävs för produktkvalitet.

- Enkel hantering.
- Specialtillverkade, isolerade transportlådor.
- Speciella kylelement som håller kyla och förhindrar frysning.
- Inget material eller vätska är toxiskt.
- Används över hela världen.

Delta-T specialtillverkade transportlådor finns i olika storlekar. Systemet består av två delar:

- Transportlåda tillverkad i material som är en bra isolator, robust att använda samt inte påverkar de produkter du önskar transportera som kräver kyltransport.
- Kylelement som man placerar i transportlådan. Kylelementen när de hanteras korrekt gör att transporterade produkter håller kylskåps-temperatur under lång tid och inte riskerar att frysas.
- Det finns transportlådor som används under vanliga transporttider och speciallådor som håller under väldigt lång tid. Dessa har extra isolering.

Delta-T tillverkas i Tyskland sedan 20 år och används över hela världen för kyltransporter.

Vilka produkter kräver ofta kyltransport?

- Vissa läkemedel
- Vacciner
- Blod
- Laboratorieprover
- Organ för transplantation
- Flera andra områden

Transporttiden i kyla:

- Transportlådans isolering samt antal element styr tillsammans med utomhustemperaturen den tid som godset håller rätt temperatur.
- Som exempel så håller en 20 L transportlåda med två element kyla i över 27 timmar.
- Samma låda men specialmodell men extra isolering och 4 element håller kyla i ca 48 timmar.



Så här använder du Delta-T transportlådor:

- Lägg in ett lämpligt antal kylelement i frysen.
- Låt dem ligga i frysen 12-24 timmar.
- 4 timmar innan användning – ta ut kyl-elementen från frysen och lägg dem i ett kyl. (När de har legat i kylan minst 4 timmar så kan de användas).
- Placera 2-4 kylelement i transportlådan på avsedda platser.
- Lägg i det kylda godset och stäng lådan.
- Om du önskar låsa lådan så finns numrerade plastband som tillbehör.

Det finns också små väskor för små volymer för kortare transporter upp till 8 timmar.

Behöver du speciallösningar?

Hör av dig till CureMed Nordic på **031-47 58 00** eller **info@curemednordic.se** så finner vi en lösning som uppfyller dina krav.

WWW.CUREMEDNORDIC.SE

CureMed Nordic AB E-POST info@curemednordic.se TELEFON 031-47 58 00

POSTADRESS Box 1128, 405 23 Göteborg BESÖKSADRESS Gruvgatan 35B, 421 30 Västra Frölunda