

*fistula*STOP®

أداة ضغط الناسور
المساعدة المبتكرة



فيستولاستوب FistulaStop هو بديل الضغط اليديوي بعد جلسة علاج غسيل الكلى

فيستولاستوب FistulaStop مريح للمريض

- لا يتعب المريض عند التعامل مع الناسور والطعوم
- ضغط متساوي في كل مرة
- وسيلة سهلة لوقف تدفق الدم
- يحل محل حاجة المريض للضغط على الناسور بعد غسيل الكلى

يتميز فيستولاستوب FistulaStop بتوافره للعديد من المنافع للعاملين في

الرعاية الصحية

- مريح لأنه يحل محل الضغط باليد
- سهولة التنظيف مع الكحول أو الماء الساخن
- يمكن إعادة استخدامه
- يمكن وبسهولة تخصيصه لمريض بعينه من خلال صندوق التخزين بالاسم
- مقاس واحد يناسب الجميع
- توفير الوقت

فيستولاستوب FistulaStop سهل الاستخدام

- ضع مسحة الشاش بين مدخل الناسور وفيستولاستوب
- تأكد من أن الجزء المنتفخ يغطي مدخل الناسور
- شد الشريط حول الذراع و ثبته
- قم بخلع فيستولاستوب عندما يتوقف تدفق الدم وقبل أن يغادر المريض
- ينبغي تغيير فيستولاستوب مرة واحدة في الشهر (إذا ما استخدم بشكل مستمر).

فيستولاستوب صنع في السويد





المنتج

كود	طلبية
FistulaStop 1 pair	F 500

CE

*fistula*STOP®

فيسٽولاسٽوب منتج خاص بالمريض. ويتم تسليمه من قطعتين (زوج) داخل صندوق بلاستيكي موسوم ببطاقة عليها اسم المريض. حقوق التصميم محفوظة. رقم التسجيل: CDR 0016141



*fistula*STOP®

أداة ضغط الناسور المساعدة المبتكرة