

*fistula*STOP[®]

**Ein innovatives
Druckmittel bei Fisteln**



FistulaStop ersetzt den manuellen Druckverband nach einer Dialysebehandlung

FistulaStop ist angenehm für den Patienten

- Angenehm für Fisteln und Transplantate
- Übt ständig einen gleichmäßigen Druck aus
- Einfache Möglichkeit, um den Blutfluss zu stoppen
- Patient muss nach der Dialyse nicht mehr auf die Fistel drücken

FistulaStop bietet auch Vorteile für das Pflegepersonal

- Ergonomisch, da kein Druck mit der Hand mehr notwendig ist
- Leicht mit Alkohol oder heißem Wasser zu reinigen
- Wieder verwendbar
- Kann durch die mit dem Namen markierte Aufbewahrungsbox einfach einem bestimmten Patienten zugewiesen werden
- Eine Größe für alle Passformen
- Zeitsparend

FistulaStop ist einfach anzuwenden

- Setzen Sie einen Tupfer zwischen dem Fistelzugang und dem FistulaStop
- Stellen Sie sicher, dass die Wölbung den Fistelzugang abdeckt
- Ziehen Sie den Streifen um den Arm herum und befestigen Sie diesen
- Entfernen Sie FistulaStop, wenn der Blutfluss gestoppt hat und bevor der Patient nach Hause geht
- FistulaStop sollte einmal pro Monat gewechselt werden (bei ständigem Gebrauch)

FistulaStop wurde in Schweden hergestellt





Bestellinformationen

Produkt	Bestellnummer
FistulaStop 1 Paar	F 500

CE

*fistula*STOP®



fistula **STOP**[®]

Ein innovatives Druckmittel bei Fisteln

WWW.CUREMEDNORDIC.SE

CureMed Nordic AB E-MAIL info@curemednordic.se PHONE +46 31 47 58 00

POSTADDRESS Box 1128, 405 23 Göteborg, Sweden VISITING ADDRESS Gruvgatan 35B, SE-421 30 Västra Frölunda, Sweden