

*fistula*STOP®

محصولی جدید  
برای فشار فیستولا



# فیستولاستاپ جایگزینی برای استفاده از دست برای فشار فیستولا بعد از درمان دیالیز می باشد

## استفاده از فیستولاستاپ برای بیمار راحت و ساده است

- طبیعی ملایم داشته و به فیستولا و رگ های مصنوعی پیوندی صدمه ای وارد نمی کند
- در هر بار استفاده فشار یکسانی را اعمال می کند
- روشی است آسان برای بند آوردن خونریزی
- عدم دخالت دست برای فشار فیستولا

## فیستولاستاپ مزایای زیادی برای پرستار آن و مراقبین پزشکی به دنبال دارد

- طراحی مناسب و افزایش کارایی به دلیل عدم دخالت دست برای فشار فیستولا
- به آسانی با الکل یا آب گرم تمیز می شود
- قابلیت استفاده مجدد
- قابلیت نگهداری در جعبه های نام گذاری شده و تخصیص به بیمار خاص
- تک سایز و مناسب برای همه موارد
- صرفه جویی در زمان

## سهولت استفاده از فیستولاستاپ

- یک باند گاز پزشکی بین فیستولا و فیستولاستاپ قرار دهید
- مطمئن شوید که برآمدگی تعبیه شده بر روی فیستولاستاپ بر روی فیستولا قرار گیرد
- بند را دور دست کشیده و آنرا محکم کنید
- هنگامیکه جریان خون بند آمد و قبل از رفتن بیمار به خانه آنرا بردارید
- فیستولاستاپ هر ماه یک بار بایستی تعویض گردد (در صورت استفاده مداوم)

فیستولاستاپ محصول کشور سوئد می باشد





#### Order information

کد سفارش محصول

فیبستولاستاپ یک جفت F 500

CE

فیبستولاستاپ محصولی است مخصوص بیمار ان. به صورت جفت در جعبه پلاستیکی با یک برجسب نام تحویل مشتری داده می شود.

*fistula*STOP®

شماره ثبت طرح CDR 001614173



*fistula*STOP®

محصولی جدید برای فشار فیستولا