

*fistula*STOP[®]

Innovatiivinen
apuväline
fisteleitä varten



FistulaStop korvaa käsin aiheutetun paineen dialyysihoidon jälkeen

FistulaStop on potilaalle mukava käyttää

- Hellävarainen fisteleille ja veriteille
- Antaa tasaisen paineen jokaisella käyttökerralla
- Helppo tapa tyrehtyttää verenvuoto
- Potilaan ei enää tarvitse painaa fisteliä dialyysihoidon jälkeen

FistulaStop hyödyttää terveydenhoidon ammattilaisia

- Ergonominen, sillä fisteliä ei enää tarvitse painaa käsin
- Helppo puhdistaa alkoholilla tai kuumalla vedellä
- Uudelleenkäytettävä
- Helppo osoittaa tietylle potilaalle nimilapuun varustetun säilytyslaatikon ansiosta
- Yksi koko sopii kaikille
- Säästää aikaa

FistulaStop on helppokäyttöinen

- Aseta fistelin suun ja FistulaStopin väliin sideharsolappu
- Varmista, että paksu kohta on fistelin aukon päällä
- Kierrä hihna käden ympäri ja kiinnitä
- Irrota FistulaStop, kun verenvuoto on tyrehtynyt ja ennen kuin potilas lähtee kotiin
- FistulaStop tulee vaihtaa kuukausittain (mikäli käyttö on jatkuvaa)

FistulaStop valmistetaan Ruotsissa





Tilaustiedot

Tuote

FistulaStop 1 pari

Tilauskoodi

F 500

CE

*fistula***STOP**[®]



*fistula*STOP®

Innovatiivinen apuväline fisteleitä varten

WWW.CUREMEDNORDIC.SE

CureMed Nordic AB E-MAIL info@curemednordic.se PHONE +46 31 47 58 00

POSTADDRESS Box 1128, 405 23 Göteborg, Sweden VISITING ADDRESS Gruvgatan 35B, SE-421 30 Västra Frölunda, Sweden