

*fistula*STOP®

Ένα καινοτόμο βοήθημα  
πίεσης συριγγίου



# Το FistulaStop αντικαθιστά την χειροκίνητη πίεση μετά τη θεραπεία της αιμοκάθαρσης

## Το FistulaStop είναι άνετο για τον ασθενή

- Ήπιο για τα συρίγγια και τα μοσχεύματα
- Εφαρμόζει πάντα ομοιόμορφη πίεση
- Είναι ένας εύκολος τρόπος για να σταματήσετε τη ροή του αίματος
- Αντικαθιστά την ανάγκη του ασθενή για πίεση στο συρίγγιο μετά την αιμοκάθαρση

## Το FistulaStop παρέχει πλεονεκτήματα για τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας

- Είναι εργονομικό καθώς αντικαθιστά την πίεση με το χέρι
- Είναι εύκολο στον καθαρισμό με οινόπνευμα ή καυτό νερό
- Είναι επανα-χρησιμοποιήσιμο
- Μπορεί εύκολα να εκχωρηθεί σε έναν συγκεκριμένο ασθενή με τη βοήθεια κουτιού αποθήκευσης με ετικέτα ονόματος
- Παρέχεται σε ένα μέγεθος
- Γίνεται εξοικονόμηση χρόνου

## Το FistulaStop είναι εύκολο στη χρήση

- Τοποθετήστε ένα μάκτρο γάζας μεταξύ της πρόσβασης του συριγγίου και του FistulaStop
- Βεβαιώνεστε ότι το εξόγκωμα καλύπτει την πρόσβαση του συριγγίου
- Τεντώστε τον ιμάντα γύρω από το βραχίονα και ασφαλίστε τον
- Αφαιρέστε το FistulaStop όταν η ροή αίματος έχει σταματήσει και προτού ο ασθενής γυρίσει σπίτι του
- Το FistulaStop πρέπει να αντικαθίσταται μια φορά το μήνα (εάν χρησιμοποιείται συνεχώς)

## Το FistulaStop κατασκευάζεται στη Σουηδία





### Πληροφορίες παραγγελίας

| Κωδικός               | παραγγελίας προϊόντος |
|-----------------------|-----------------------|
| FistulaStop 1 ζευγάρι | F 500                 |

*fistula*STOP®

Το FistulaStop είναι ένα προϊόν το οποίο δένεται στον ασθενή. Παρέχεται σε ζεύγη σε ένα πλαστικό κουτί με προσαρτημένη επάνω σε αυτό μια ετικέτα ονόματος. Αρ. καταχ.

προστατευμένου σχεδίου CDR 001614173





*fistula*STOP®

**Ένα καινοτόμο βοήθημα πίεσης συριγγίου**