

*fistula*STOP[®]

**Un innovativo
strumento di
pressione sulle fistole**



FistulaStop sostituisce la pressione manuale dopo la dialisi

FistulaStop è confortevole per il paziente

- Delicato sulle fistole e le ulcerazioni
- Applica una pressione omogenea ogni volta
- Un modo facile per arrestare il flusso sanguigno
- Sostituisce la necessità per i pazienti di esercitare una pressione sulle fistole dopo la dialisi

FistulaStop è vantaggioso anche per gli assistenti sanitari

- Ergonomico, poiché sostituisce la pressione manuale
- Facile da lavare con alcol o acqua calda
- Riutilizzabile
- Può essere facilmente assegnato a un particolare paziente grazie alla scatola con l'etichetta per il nome
- Misura unica
- Permette di risparmiare tempo

FistulaStop è facile da usare

- Applicare un tampone di garza fra l'ingresso della fistola e FistulaStop
- Accertarsi che il rigonfiamento copra l'accesso alla fistola
- Tendere la cinghia intorno al braccio e fissarla
- Rimuovere FistulaStop quando il flusso di sangue si è arrestato e prima che il paziente ritorni a casa
- Sostituire FistulaStop una volta al mese (se viene utilizzato in modo continuativo)

FistulaStop è fabbricato in Svezia





Informazioni per gli ordini

Codice per ordinare il prodotto

FistulaStop 1 paio F 500

*fistula*STOP®

CE

FistulaStop è un prodotto associato al paziente. Viene fornito in una scatola di plastica con un'etichetta fissata ad essa.

Design protetto con n. di registrazione CDR 001614173



*fistula*STOP®

Un innovativo strumento di pressione sulle fistole

WWW.CUREMEDNORDIC.SE

CureMed Nordic AB E-MAIL info@curemednordic.se PHONE +46 31 47 58 00

POSTADDRESS Box 1128, 405 23 Göteborg, Sweden VISITING ADDRESS Gruvgatan 35B, SE-421 30 Västra Frölunda, Sweden