

# *fistula*STOP<sup>®</sup>

Een innovatief  
hulpmiddel voor het  
afdrukken van shunts



# FistulaStop vervangt handmatig afdrukken na een dialysebehandeling

## FistulaStop is comfortabel voor de patiënt

- Prettig bij shunts en transplantaten
- Geeft steeds een gelijkmatige druk
- Een gemakkelijke manier om het bloeden te stoppen
- De patiënt hoeft na de dialyse de shunt niet meer zelf af te drukken

## FistulaStop biedt voordelen voor de gezondheidswerkers

- Ergonomisch omdat het product het handmatig afdrukken vervangt
- Eenvoudig te reinigen met alcohol of warm water
- Herbruikbaar
- Elke opbergdoos heeft een naamplaatje om het zoeken te vereenvoudigen
- Eén maat
- Tijdbesparend

## FistulaStop is gemakkelijk in gebruik

- Leg een gaasverband tussen de shuntopening en de FistulaStop
- Zorg ervoor dat de uitstulping de shuntopening bedekt
- Trek de riem om de arm heen en zet hem vast
- Verwijder de FistulaStop als het bloeden is gestopt en voordat de patiënt naar huis gaat
- De FistulaStop moet één keer per maand worden verwisseld (als deze voortdurend wordt gebruikt)

## FistulaStop wordt in Zweden gefabriceerd





#### Bestelinformatie

Product	Bestelcode
FistulaStop 1 paar	F 500

CE

*fistula*STOP®

FistulaStop is een patiëntgebonden product. Het product wordt per paar geleverd in een plastic doos met naamplaatje.

Reg.nr. ontwerpbescherming CDR 001614173



# *fistula*STOP®

Een innovatief hulpmiddel voor het afdrukken van shunts

WWW.CUREMEDNORDIC.SE

CureMed Nordic AB E-MAIL [info@curemednordic.se](mailto:info@curemednordic.se) PHONE +46 31 47 58 00

POSTADDRESS Box 1128, 405 23 Göteborg, Sweden VISITING ADDRESS Gruvgatan 35B, SE-421 30 Västra Frölunda, Sweden