


Monteringsanvisning Skötbord Baby

CureMed
NORDIC

Delar


Bensektion gavel 2 st

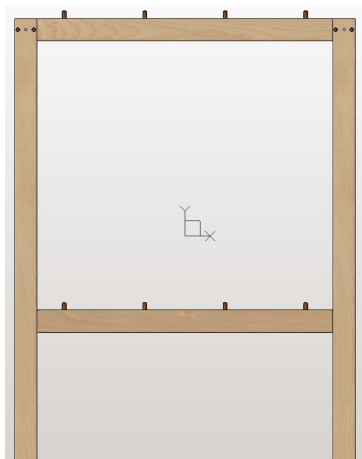

Stag 2 st




Hylla 1 st

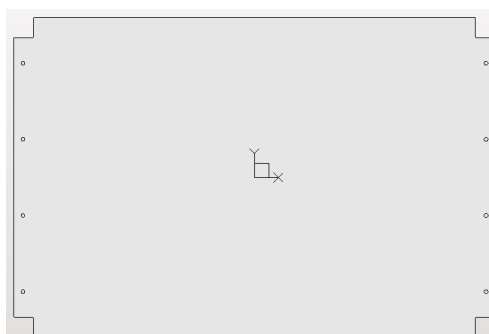

Beslagspåse 1 st



Skötbord 1 st

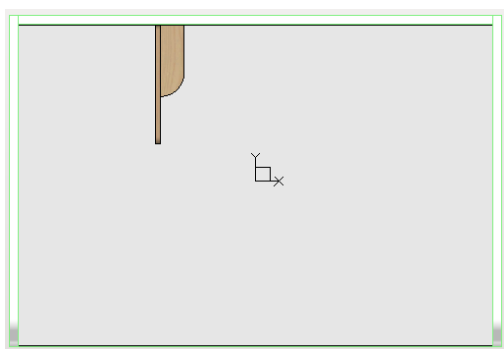

Verktyg som behövs för montaget:

1 st stjärnskruvmejsel

1. Montera kopplingsbeslaget i hålet i staget.




2. Montera centrumtapp samt kopplingsskruv i hålen i bengavlarna. Använd stjärnskruvmejsel till kopplingsskruven




3. Montera ihop bengavlarna med stagen.

Drag åt kopplingsbeslaget med stjärnskruvmejsel.

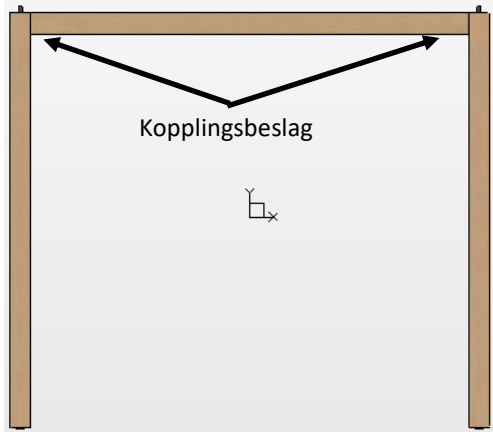

4. Lägg hyllan ovanpå centrumtapparna på bengavlarna. Skruva fast med skruv från undersidan

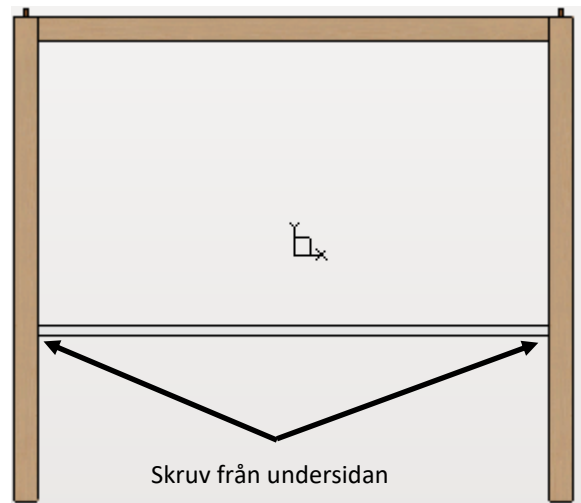

5. Lägg skötbordet ovanpå centrumtapparna på bengavlarna. Skruva fast med skruv från Undersidan.

